

Una terapia all'avanguardia per le articolazioni, a base di acido ialuronico, con azione sul liquido sinoviale

EASYAL è un prodotto iniettabile consistente in una soluzione tampone di sale sodico di acido ialuronico con rimarcate proprietà viscoelastiche, altamente purificata, con peso molecolare tra 1.000 e 1.500 KDalton. È disponibile in due versioni: 40 mg/ 2 ml (2%) e 80 mg/ 4 ml (2%). Lo ialuronato di sodio è una componente fondamentale del fluido sinoviale, al quale conferisce le caratteristiche proprietà di viscoelasticità. Lo ialuronato di sodio di **EASYAL** è ottenuto mediante fermentazione senza trattamenti chimici. Si presenta sotto forma di siringhe di vetro monouso pre-riempite con una soluzione sterile apirogena. Nelle malattie reumatiche e degenerative delle articolazioni si verifica un calo dell'acido ialuronico con conseguente riduzione della viscosità del fluido sinoviale. Ciò porta al deterioramento della funzionalità delle articolazioni e alla comparsa del dolore. La somministrazione di acido ialuronico a livello intra-articolare permette di ripristinare la viscoelasticità del liquido sinoviale, apportando un significativo miglioramento della mobilità articolare e l'attenuazione del dolore e della risposta infiammatoria.

Il protocollo **EASYAL2** 40mg/2ml prevede un ciclo di 3 iniezioni settimanali che permettono di attenuare il dolore e il gonfiore e di recuperare la funzionalità delle articolazioni.

Il protocollo **EASYAL4** 80mg/4ml prevede una singola iniezione che permette di attenuare il dolore e il gonfiore e di recuperare la funzionalità delle articolazioni. **EASYAL** presenta un'ottima tollerabilità e agisce unicamente a livello dell'articolazione nella quale viene iniettato, non esercitando alcuna azione sistemica.

CONDROPATIA E VISCOSUPPLEMENTAZIONE

La Cartilagine, il tessuto levigato e flessibile che ricopre le ossa di tutte le articolazioni, ammortizzando la frizione tra le ossa durante il movimento, è soggetta a un naturale deterioramento causato dall'invecchiamento, dal sovraccarico nelle persone obese o dall'usura nelle persone che svolgono determinati tipi di lavoro.

Una delle malattie croniche degenerative che colpiscono più comunemente le articolazioni è la condropatia, che può essere locale degenerativa, post-traumatica o iatrogena (FANS o corticosteroidi).

La Condropatia altera lentamente e gradualmente la cartilagine articolare, fino a distruggerla. Il paziente avverte dolore alle articolazioni, costante o periodico, che ne limita i movimenti nelle aree interessate; in questi pazienti si riscontra un notevole calo delle proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale e ciò solitamente determina un peggioramento della qualità della vita.




Le articolazioni maggiormente colpite sono



GINOCCHIO



SPALLA

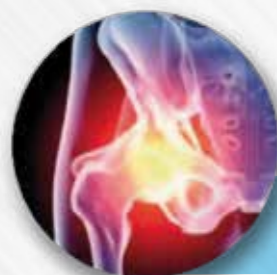

ANCA



DITA

Il trattamento per questo tipo di patologie è multimodale e mira ad attenuarne i sintomi

- Terapie non farmacologiche come la riabilitazione muscolare e la riduzione dello stress fisico
 - Terapie farmacologiche sistemiche a base di FANS o analgesici
 - Terapie farmacologiche a livello locale come iniezioni di cortisone e terapie intra-articolari con acido ialuronico (viscosupplementazione).
- L'iniezione di acido ialuronico ha l'effetto immediato di ristabilire la salute del fluido sinoviale, che torna a fungere da lubrificante e ammortizzatore degli shock.

Questa terapia, basata su iniezioni di ialuronati, riduce il dolore e migliora la mobilità dell'articolazione trattata, per cui ha effetto curativo, ma anche preventivo sui tessuti, riducendo la penetrazione di cellule e mediatori infiammatori.

ISTRUZIONI PER L'USO

Scatola contenente 1 siringa monouso pre-riempita (una siringa contiene 40 mg di acido ialuronico in 2 ml di soluzione tampone). Siringhe sterilizzate.
Scatola contenente 1 siringa monouso pre-riempita (una siringa contiene 80 mg di acido ialuronico in 4 ml di soluzione tampone). Siringhe sterilizzate

DOSAGGIO E ISTRUZIONI PER L'USO

EASYAL (40 mg) Iniezione intra-articolare di 2 ml di prodotto una volta a settimana per tre settimane, salvo diverse indicazioni del proprio medico e a seconda delle condizioni del paziente. Qualora siano necessari altri cicli di trattamento, far passare almeno 6 mesi. Se il medico lo ritiene opportuno e a seconda delle condizioni del paziente, è possibile trattare più articolazioni allo stesso tempo.

EASYAL (80 mg) Iniezione intra-articolare di 4 ml di prodotto una sola volta, salvo diverse indicazioni del proprio medico e a seconda delle condizioni del paziente. Qualora siano necessari altri cicli di trattamento, far passare almeno 6 mesi. Se il medico lo ritiene opportuno e a seconda delle condizioni del paziente, è possibile trattare più articolazioni allo stesso tempo.